

Recomendaciones de limpieza

LIMPIADORES RECOMENDADOS

Limpiadores sugeridos para cada superficie:

Limpiadores cuaternarios (ingrediente activo: cloruro de amonio).

Limpiadores fenólicos (ingrediente activo: o-fenilfenol).

Solución de blanqueador clorado (5.25 %: 1 parte de blanqueador por 10 partes de agua).

Evite saturar de más y asegúrese de que el producto no permanezca húmedo por más tiempo del que indican los lineamientos del fabricante del químico para una desinfección correcta.

MÉTODO DE LIMPIEZA RECOMENDADO

- Lave a mano todas las superficies del colchón con agua tibia y un limpiador de detergente suave.
- Seque perfectamente.
- Aplique una solución desinfectante, ya sea en rocío, en solución o en toallitas impregnadas (no empape el colchón).
- Limpie el colchón siguiendo el protocolo hospitalario.
- Limpie el exceso de desinfectante.
- Enjuague con agua limpia.
- Permita que se seque la superficie.

DESINFECTANTES RECOMENDADOS

IMPORTANTE: DILUYA TODOS LOS DESINFECTANTES DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

Cuando se usa en concentraciones recomendadas por el fabricante, se recomienda el uso de blanqueador diluido, fenólico diluido o desinfectantes germicidas cuaternarios diluidos. El blanqueador clorado, típicamente 5.25 % de hipoclorito de sodio, debe utilizarse en una proporción de dilución de 1 parte blanqueador con 10 partes de agua.



ENJUAGUE DE LIMPIADORES CORROSIVOS

Para proteger su garantía, debe utilizar un limpiador aprobado de nuestra lista y enjuagar correctamente todos los agentes limpiadores y químicos desinfectantes después de la aplicación.

Con el paso del tiempo, incluso las soluciones limpiadoras aprobadas pueden provocar daños a la integridad de las telas que se usan en colchones médicos y superficies de soporte. Los agentes de limpieza suficientemente fuertes para ser limpiadores eficaces y desinfectantes pueden degradar las mismas telas donde se están aplicando.

A fin de minimizar el impacto negativo de dichos agentes limpiadores y para maximizar la vida usable de las cubiertas del colchón médico, se debe prestar atención al tiempo de permanencia o cuando la solución limpiadora está en contacto con la tela. Esto debe vigilarse y mantenerse dentro del tiempo requerido identificado en las instrucciones del fabricante.

Estos productos NO se consideran detergentes suaves. Si el área que va a limpiarse simplemente se retira con una toalla o se deja secar al aire después del proceso de limpieza, la solución misma permanecerá en la superficie de la tela y continuará degradándola. Cada vez que se desinfecta la tela cubierta sin enjuagar muy bien con agua limpia, se quedan más químicos residuales para posiblemente dañar la integridad de la tela y negar la garantía.

 PRECAUCIÓN: la limpieza y el enjuague incorrecto, y el uso incorrecto de los agentes de limpieza pueden provocar la decoloración prematura, resistencia a líquidos y fuerza de la tela, y anulará la garantía del producto.

No se recomiendan los desinfectantes tipo yodóforo porque pueden manchar.

En general, nuestras tres telas de cubierta básica (Lifespan® Stretch, Barrier y Coverlet) pueden usarse con los siguientes tipos de limpiador/desinfectante:

Fenólico Cuaternario Peróxido de hidrógeno Alcohol Hipoclorito de sodio (blanqueador)***

** Las altas concentraciones de cloro activo pueden tener un efecto negativo en las telas con recubrimiento de poliuretano. Utilice concentraciones diluidas y enjuague muy bien la cubierta con agua.

* Revise la etiqueta del producto. Las concentraciones mayores a 0.5 % o la presencia de otros ingredientes activos (por ejemplo: alcohol de bencilo) pueden reducir prematuramente la integridad del recubrimiento de la cubierta, especialmente cuando no se enjuaga después de la aplicación. Por lo tanto, no se recomienda el uso de estos productos.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Velcro	Para limpiar y desinfectar, sature con desinfectante, enjuague con agua y permita que se evapore.
Tierras o manchas	Utilice jabones neutros y agua tibia. No use limpiadores fuertes, solventes o limpiadores abrasivos.
Manchas difíciles de limpiar	Utilice limpiadores estándar para el hogar/de vinilo y un cepillo de cerdas suaves en manchas difíciles. Remoje la tierra pesada y seca.
Lavandería	NO SE RECOMIENDA la lavandería. La lavandería puede disminuir sustancialmente la vida útil del colchón.

NO LIMPIE LOS COLCHONES CON VAPOR, A PRESIÓN, CON MANGUERA O ULTRASONIDO.

El uso de estos métodos de limpieza no se recomienda y puede anular la garantía del producto.

Los ejemplos de algunos limpiadores se proporcionan en la siguiente tabla.

Nombre comercial	Tipo	Fabricante
A33	Cuaternario	Airkem
Absolute	Cuaternario	Walton-March
Alcide LD	Óxido de cloro	Alcide
Beaucoup	Fenólico	Huntington
Blue Chip	Cuaternario	S.C. Johnson
Toallitas Cavi	Hipoclorito de sodio	P&G
Toallitas Clorox Bleach (5000 ppm)	Peróxido de hidrógeno	Diversey
Coverage 256	Cuaternario	Calgon Vestal
Toallitas desinfectantes y limpiador con cloro para hospital Dispatch®	Hipoclorito de sodio	Caltech
El Dorado Plus	Cuaternario	Puritan/Churchill
Elimstaph	Cuaternario	Walter G. Legge
Forward DC	Cuaternario	S.C. Johnson
Franklin Sentinel	Cuaternario	Purex
Galahad	Fenólico	Puritan/Churchill
Hi-Tor Plus	Cuaternario	Huntington
Insurance	Cuaternario	Calgon Vestal
LPH	Fenólico	Calgon Vestal
Lysol I.C. Desinfectante	Fenólico	National Laboratories
Matar	Fenólico	Huntington
Omega	Cuaternario	Airkem
One-Stroke	Fenólico	Calgon Vestal
Oxivir TB	Peróxido de hidrógeno	Diversey
Sani-Cloth® Bleach	Hipoclorito de sodio	PDI
Pro-Tech RDI-36B	Cuaternario	Central Solutions, Inc.
Quanto	Cuaternario	Huntington
Quat Sanitizer	Cuaternario	Ecolab
Quat Sanitizer II	Cuaternario	3M
Sanikleen	Cuaternario	West Chemical
Sanimaster III	Cuaternario	Service Master
Surfacide	Cuaternario	Walton-March
Tri-Quat	Cuaternario	Calgon Vestal
Vesphene II	Cuaternario	Calgon Vestal
Toallita para superficie de hospital Viraguard®	Cuaternario	Veridien
Virex 128	Cuaternario	S.C. Johnson
Virex II 256	Fenólico	Diversey
Virox 5	Cuaternario	Diversey

La intención de esta lista no es ser inclusiva ni debe considerarse una recomendación o patrocinio de ningún producto por parte de Span-America Medical Systems, Inc.

LOS DESINFECTANTES QUE SE APLICAN A CONCENTRACIÓN TOTAL O EN SOLUCIONES ALTAMENTE CONCENTRADAS DISMINUIRÁN LA VIDA ÚTIL DE LAS TELAS.

La información incluida en este boletín se considera confiable. Se ofrece de buena fe y su intención es que sea una guía general. Span-America Medical Systems, Inc. no garantiza los resultados ni asume ninguna obligación en relación con el uso de esta información.